

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения

Гель офтальмологический увлажняющий **RELINS-GEL поддержка**



Назначение: Гель офтальмологический увлажняющий *RELINS-GEL поддержка* (далее – *RELINS-GEL поддержка*) предназначен для использования в офтальмологии в качестве профилактического средства для длительного увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаза (роговицы и конъюнктивы); способствует улучшению состояния слезной пленки и защищает роговицу от пересыхания.

Описание:

RELINS-GEL поддержка представляет собой стерильный легкотекучий гель без посторонних включений от желтого до темно-оранжевого цвета, применяемый в виде глазного геля для закладывания в конъюнктивальный мешок.

Состав:

Вода очищенная, стабилизатор, витамин Е, карбонер, кварцетин, ЭДТА динатриевая соль, гидроксид натрия. СТЕРИЛЬНО. Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.

Показания к применению:

RELINS-GEL поддержка показан к применению:

- ▶ при синдроме «сухого глаза», сопровождающегося дискомфортом, жжением, рефлекторным слезотечением, раздражением, усталостью, сухостью, чувством инородного тела и песка, покраснением глаз;
- ▶ при нарушении слезоотделения для улучшения состояния липидного слоя слезной пленки и защиты глазной поверхности;
- ▶ в качестве дополнительного вспомогательного средства при основном лечении дистрофии роговицы;
- ▶ в комплексной терапии воспалительных процессов переднего отрезка глаза;
- ▶ для облегчения проявления аллергического конъюнктивита.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов геля.

Побочные действия:

Побочные эффекты не обнаружены.

Область применения:

RELINS-GEL поддержка может быть назначен или рекомендован врачом-офтальмологом или специалистом по контактной коррекции для увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаза.

RELINS-GEL поддержка:

- ▶ способствует нормализации показателей местного иммунитета;
- ▶ способствует улучшению трофики глазных тканей, глазной гидродинамики;
- ▶ способствует нормализации метаболических процессов;
- ▶ способствует нормализации липидного метаболизма, снижению липидной перекисидации и окислению липопротеинов;
- ▶ снижает выраженность/влияние оксидативного стресса на глазные клетки;
- ▶ способствует ингибированию окислительных ферментативных процессов;
- ▶ нормализует патохимические механизмы, препятствуя развитию воспалительных и апоптотических процессов;
- ▶ в качестве скванжера свободных радикалов (способен быть донатором водорода и газителем синглетного кислорода, хелатором ионов металлов);
- ▶ способствует активации антиоксидантных ферментов;
- ▶ ингибирует фермент альдоредуктазу (антиальдозоредуктазная активность).

Изделие предназначено для личного индивидуального использования, как в домашних условиях, так и в лечебно-профилактических учреждениях для применения в профилактических целях и в качестве дополнительной терапии к основному лечению с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

⚠ Предостережения:

RELINS-GEL поддержка может применяться у детей, в том числе новорожденных, а также у женщин в период беременности и лактации; данные об опыте применения отсутствуют и назначение возможно только после консультации с врачом-офтальмологом.

Не используйте *RELINS-GEL поддержка* при наблюдении неприятных ощущений в глазах в течение 15 минут после использования; при сохранении неприятных ощущений после прекращения использования обратитесь к врачу-офтальмологу.

При необходимости одновременного применения с терапевтическими офтальмологическими препаратами используйте *RELINS-GEL поддержка* только после консультации с врачом-офтальмологом и через **30 минут после** использования другого препарата.

Не применяйте *RELINS-GEL поддержка* при надетых контактных линзах.

Использование *RELINS-GEL поддержка* с контактными линзами: удалите контактные линзы из глаз, закапайте *RELINS-GEL поддержка*, наденьте контактные линзы не ранее чем через 30 минут после использования геля. Используйте *RELINS-GEL поддержка* до даты истечения срока годности, указанной на коробке и флаконе. Не используйте *RELINS-GEL поддержка* по истечении **6 недель после первого вскрытия флакона.**

Храните в недоступном для детей месте.

RELINS-GEL поддержка не оказывает отрицательное влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (например, управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.). Непосредственно после использования *RELINS-GEL поддержка* возможно кратковременное «затуманивание» зрения, в этом случае следует дождаться распределения геля по поверхности глаза и стабилизации зрения.

Принцип действия:

RELINS-GEL поддержка:

- ▶ обладает прямым антиоксидантным действием, защищая переднюю поверхность глаз (роговицу и конъюнктиву) от окислительных процессов/ от действия агрессивных свободных радикалов;
- ▶ равномерно распределяется и длительно удерживается на передней поверхности глаза (роговице и конъюнктиве);
- ▶ обладает смазывающими и увлажняющими свойствами;
- ▶ защищает роговицу от пересыхания;
- ▶ устраняет ощущения дискомфорта в глазах;
- ▶ способствует профилактике и снижению риска развития различных заболеваний (дистрофии сетчатки и др.);
- ▶ способствует смягчению/подавлению воспалительных процессов глаза;
- ▶ способствует облегчению симптомов аллергического конъюнктивита;
- ▶ способствует защите передней поверхности глаза.

RELINS-GEL поддержка – это специально разработанная комбинация веществ с кварцетином в составе, которая способствует поддержке естественных обменных процессов, эфферективному и бережному сохранению зрения и зрительных функций.

Кварцетин, входящий в состав *RELINS-GEL поддержка*, обладает антиоксидантными свойствами, что способствует

защите тканей глаза от агрессивных процессов окисления, которые нарушают естественные / гармоничные биохимические процессы, тем самым, поддерживая здоровье глаз. Витамин Е усиливает антиоксидантные свойства геля, способствует поддержанию его стабильности на протяжении заявленного срока годности.

Карбомер обеспечивает увлажнение глаз, а также необходимую вязкость препарата для пролонгированного увлажнения и удержания влаги роговицы и витамина Е на поверхности глаз, что обеспечивает эффективное увлажнение и сильный антиоксидантный эффект.

При применении *RELINS-GEL поддержка* на передней поверхности роговой оболочки глаза образуется тонкая пленка, предохраняющая глаза от пересыхания, защищающая переднюю поверхность глаз (роговицу и конъюнктиву) от окислительных процессов.

Постоянное и достаточное увлажнение поверхности глаза *RELINS-GEL поддержка* способствует поддержке здоровья глаз.

Указания по применению:

Рекомендуется закапывать *RELINS-GEL поддержка* в конъюнктивный мешок по 1 капле 4-6 раз в день, а также 1 каплю на ночь. Частота использования *RELINS-GEL поддержка* зависит от субъективных ощущений, а также назначения или рекомендаций врача-офтальмолога.



RELINS-GEL поддержка закапывайте в чистые глаза, **без контактных линз** и, по возможности, без мажика.



Перед использованием *RELINS-GEL поддержка* тщательно вымойте руки с мылом.



Снимите защитный колпачок с флакона и не касайтесь открытого кончика вставки-капельницы флакона.



Запрокиньте голову, оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх и закапайте 1 каплю геля в промежуток, образовавшийся между веком и глазным яблоком (в конъюнктивальную полость).



Медленно закройте глаза, чтобы *RELINS-GEL поддержка* равномерно распределился по всей поверхности глаза.



В течение 30 минут не применяйте другие офтальмологические средства и не надевайте контактные линзы.



Для улучшения эффекта от использования *RELINS-GEL поддержка* рекомендуется закапывать гель на ночь.

RELINS-GEL поддержка не чувствуется при закапывании в глаза за счет специально разработанного состава с определенной вязкостью, что обеспечивает комфортное использование геля.

Условия использования:

В течение 30 минут после использования не применяйте другие офтальмологические средства и не надевайте контактные линзы.

RELINS-GEL поддержка может применяться в течение 6 недель после первого вскрытия флакона.

Условия хранения:

Храните *RELINS-GEL поддержка* в плотно закрытом флаконе в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +1 до +25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80% (при 25 °С).

Условия транспортирования:

RELINS-GEL поддержка транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта на территории перевозки в диапазоне температур, соответствующем условиям хранения.

Утилизация:

RELINS-GEL поддержка с истекшим сроком годности утилизируют путем разбавления водопроводной водой в тридцатикратном (1:30) размере и сливают в общую канализационную систему. Упаковка (первичная и потребительская) утилизируются как бытовые отходы.

Срок годности:

Срок годности *RELINS-GEL поддержка* 2 (два) года с даты изготовления.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Дезинфекция и очистка:

RELINS-GEL поддержка поставляют стерильным и не требующим дополнительной дезинфекции или обработки.

Гарантии производителя:

Производитель гарантирует соответствие продукции технологическим инструкциям предприятия, а также сохранение свойств геля 2 (два) года с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

По вопросам, связанным с применением *RELINS-GEL поддержка*, обращайтесь к производителю.

Форма выпуска:

RELINS-GEL поддержка в полимерных флаконах номинальной массой 10 грамм в потребительской упаковке с инструкцией по применению, размещенной на листке-вкладыше.

Производитель:

ООО «Доктор Клаус»
223053, Республика Беларусь,
Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, к. 4, ком. 616;

Произведено:

Республика Беларусь,
Минская обл.,
Минский р-н, д. Лесковка,
ул. Совхозная, д. 4-1.
сайт: relins.by
e-mail: info@doctorklaus.by
тел./факс: +375 17 51 139 51

Страна производства: Республика Беларусь

Расшифровка символов и обозначений, используемых при маркировке:



— Температура хранения от +1 до +25 °С.



— Не использовать продукт, если упаковка повреждена или вскрыта (нарушена целостность защитного кольца крышки).



— Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией!



— Избегать попадания прямых солнечных лучей.



— Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.



— Возможность утилизации использованной упаковки (упаборочных средств) - петля Мебиуса.



— Производитель.



— Номер партии.



— Дата производства.



— Использовать до... (дата (месяц, год), до которой допускается безопасное применение продукции (срока годности)).