

АКВА МАРИС®

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Средство для промывания «Аква Марис»®, к устройству оториноларингологическому для промывания слизистой носа индивидуальному «Аква Марис»® Лейка»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: №ФСЗ 2010/07752 от 03.08.2016 г.

ОПИСАНИЕ

Средство для промывания Аква Марис® представляет собой 30 пакетов-саше с солью Адриатического моря, богатой полезными микроэлементами и минералами. Средство используется совместно с Устройством для промывания Аква Марис® Лейка. 1 пакет-саше содержит 2,97 г морской соли.

При промывании полости носа с помощью средства для промывания Аква Марис® с поверхности слизистой оболочки удаляются патологические содержимое вместе с вирусами, бактериями, аллергенами и пылью, уменьшается отек и воспаление. На слизистую оболочку оказывают благотворное воздействие полезные микроэлементы и соли Адриатического моря:

- ионы кальция и магния значительно улучшают работу клеток мерцательного эпителия, нормализуют респираторные функции слизи, усиливают устойчивость слизистой оболочки к выделению вирусов и бактерий
- йод и хлорид натрия оказывают антисептический эффект, а также активизируют выработку защитной слизи
- ионы цинка и селена стимулируют местный иммунитет слизистой носа и околоносовых пазух.

НАЗНАЧЕНИЕ


Средство для промывания Аква Марис® рекомендовано для индивидуального использования и применяется в целях лечения и профилактики различных воспалительных заболеваний носоглотки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:


Средство для промывания Аква Марис® обеспечивает эффективное и бережное освобождение носоглотки от слизи и инородных частиц и рекомендуется к применению:

- при остром и хроническом рините
- при ОРВИ
- при аллергическом рините
- при остром и хроническом гайморите, фронтите, этмоидите
- при повышенной сухости слизистой оболочки носа и образовании корок
- часто болеющим пациентам
- после хирургического вмешательства на полости носа (по рекомендации врача).


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

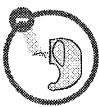

Разрежьте пакетик и высыпьте морскую соль в устройство.

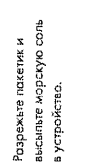


Займите удобное положение перед раковиной. Голову наклоните вперед и слегка поверните в сторону.

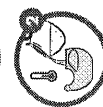

Заполните устройство кипяченой водой температуры тела до метки и перемешайте до полного растворения соли.

(продолжение см. на обороте)

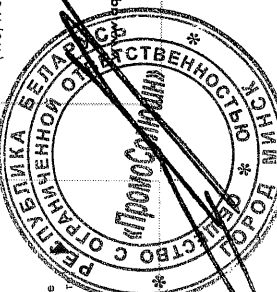

Директор Тизгорьев Т.А.
ВЕРНО




1 Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Приложите кончик устройства к вышерасположенной ноздре таким образом, чтобы он был плотно прижат к ней.




2 Наклоните устройство таким образом, чтобы раствор начал поступать из кончика устройства в носовой ход. Раствор будет вытекать из противоположной ноздри.




3 Для удаления остатков раствора из носа выскрывать, не меняя положения головы.

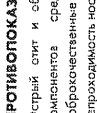

4 Затем выскрывать в прямом положении.

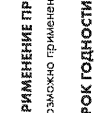

5 Повторите процедуру с другой ноздрей.

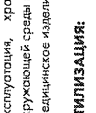

6 После использования промойте устройство прохладной водой и хорошо его высушите.

Раствор морской соли рекомендуется использовать ежедневно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, полная непроходимость носовых ходов, детский возраст до 3-х лет.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не выявлены.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Возможно применение при беременности и в период лактации.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Эксплуатация, хранение, транспортирование осуществляются при температуре окружающей среды не выше 25°C. Медицинское изделие должно храниться в сухом, недоступном для детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Средство для промывания Аква Марис® не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для его утилизации не требуются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADKAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. (JADKAN - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ д.о.о.), Špilja 20, 51000 Rijeka, Croatia (Спилжа 20, 51000 Риека, Хорватия).

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ООО «АДРАН»:

19030, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, офис 30, тел/факс: (495) 970-18-82 / (495) 970-18-83.



ASUB1291 / 01

FREE SPACE



AQUA-MARIS LETKA VRESCICE SOLI LEAFLET 149-1-051051051051		CODE ASUB1291	VERSION 1	DATE 15.04.2016	DIMENSIONS 150 x 300 mm	PHARMACODE 149-150	EAN CODE P01P01P01P01	PONT PREPRESS	Adobe Illustrator CS6
COLOURS PANTONE 2592 PANTONE 2756		Non printing colours							