

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist с контейнером для хранения контактных линз.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist с контейнером для хранения контактных линз.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist с контейнером для хранения контактных линз предназначен для ежедневной очистки, удаления белковых и сокращения липидных отложений, промывания, увлажнения, химической (не тепловой) дезинфекции и хранения всех типов мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые, в соответствии с рекомендациями офтальмолога.

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist представляет собой стерильный буферный водный раствор, содержащий натрия цитрат, натрия хлорид, борную кислоту, сорбитол, аминотетрапропанол, динатрия эдетат, два увлажняющих вещества (TETRONIC 1304 и увлажняющую матрицу HydraGlyde [ЕОВО-41 - полиоксиэтилен-полиоксибутилен]), консерванты ПОЛИКВАД (полидрония хлорид) 0,001% и АЛДОКС (миристамидопропилдиметиламин) 0,0006%. Увлажняющая матрица HydraGlyde является запатентованным многофункциональным блок-сополимером, разработанным для увлажнения и смазывания силикон-гидрогелевых контактных линз. Может содержать хлористоводородную кислоту и/или натрия гидроксид до доведения рН. BASF.

ДЕЙСТВИЕ (механизм действия)

При использовании в соответствии с инструкцией по применению раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist:

- очищает ваши линзы посредством удаления белковых и сокращения липидных отложений с поверхности контактных линз во время дезинфекции и хранения;
- содержит биосовместимые дезинфектанты ПОЛИКВАД и АЛДОКС, обладающие активностью против патогенных микроорганизмов (бактерий, грибов и акантамебы), которые могут стать причиной глазных инфекций;
- промывает и увлажняет все типы мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые;
- дезинфицирует и сохраняет линзы чистыми до 30 дней после дезинфекции.

УВЛАЖНЕНИЕ, СМАЗЫВАНИЕ, УДЕРЖИВАНИЕ ВЛАГИ И ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ НОШЕНИИ ЛИНЗ

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist:

- Обеспечивает длительное 16-часовое увлажнение, сохраняя комфорт в течение всего дня. Увлажняющая матрица HydraGlyde работает независимо от вашей слезной пленки, сохраняя влагу и обеспечивая комфортное ношение контактных линз с момента надевания до снятия.
- Сохраняет защитный слой влаги между линзой и глазом, позволяющий вашему веку скользить по поверхности линзы, не вызывая раздражения.
- Сохраняет линзу увлажненной в течение дня.
- Связывается с сухими участками линз, предотвращая образование липидных отложений.
- Сокращает количество липидных отложений и удаляет белковые отложения, сохраняя свежесть и чистоту линз.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist с контейнером для хранения контактных линз предназначен для ежедневной очистки, увлажнения, промывания, удаления белковых и сокращения липидных отложений, химической (не

тепловой) дезинфекции и хранения всех типов контактных линз, включая силикон-гидрогелевые, в соответствии с рекомендациями офтальмолога.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (причины невозможности использования)

Не используйте раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist при наличии аллергии на любой из компонентов раствора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для правильного применения и ухода за контактными линзами, а также корректного использования продуктов по уходу за линзами, включая контейнер для линз, крайне важно соблюдать рекомендации офтальмолога и выполнять все инструкции, указанные на упаковке. Не допускается повторное использование или «разбавление» раствора в контейнере для линз, поскольку это приводит к уменьшению эффективности дезинфекции линзы. Недостаточная эффективность дезинфекции может привести к заболеваниям глаз, включая инфекцию или язвы роговицы, которые могут прогрессировать и привести к потере зрения. Если вы испытываете не проходящий дискомфорт в глазах, чрезмерное слезотечение, ухудшение зрения или покраснение глаз, немедленно снимите линзы и проконсультируйтесь с офтальмологом, так как проблема может привести к более серьезным последствиям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте раствор в случае повреждения или отсутствия пломбы перед первым вскрытием.
- Всегда используйте свежий многофункциональный раствор Опти-Фри PureMoist. Никогда не используйте повторно раствор в контейнере для хранения линз.
- Никогда не используйте для дезинфекции линз воду, физиологический раствор или увлажняющие капли.
- Не следует прикасаться кончиком флакона к какой-либо поверхности, чтобы избежать загрязнения флакона и его содержимого.
- Закрывайте флакон после каждого использования.
- В период, когда раствор не используется, держите флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте оставшийся раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Храните при температуре от 15 до 30 °С.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор для тепловой (термической) дезинфекции.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Если вы испытываете не проходящий дискомфорт в глазах, чрезмерное слезотечение, ухудшение зрения или покраснение глаз, немедленно снимите линзы. Проконсультируйтесь с офтальмологом для выявления проблемы и обратитесь за медицинской помощью во избежание серьезных повреждений. Возможно наличие глазной инфекции, которая при отсутствии лечения может привести к потере зрения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие рекомендации:

- Перед обработкой контактных линз всегда тщательно мойте и ополаскивайте руки, вытирайте их чистым безворсовым полотенцем.
- Очищайте, промывайте и дезинфицируйте линзы каждый раз после того, как снимаете их с глаз.
- При ношении линз не допускайте контакта с нестерильной водой.
- Заменяйте контейнер для контактных линз не менее одного раза каждые три месяца или в соответствии с рекомендациями производителя контейнеров для линз.

Руководство по использованию:

Соблюдайте следующие рекомендации для получения оптимальных результатов очищения, увлажнения, дезинфекции, удаления белковых отложений, ополаскивания и хранения ваших линз:

- Тщательно увлажните каждую сторону линзы многофункциональным раствором Опти-Фри PureMoist.

- Протрите каждую сторону линзы подушечкой пальца в течение 10 секунд (общее время обработки одной линзы – 20 секунд).
- Промывайте каждую сторону линзы непрерывной струей многофункционального раствора Опти-Фри PureMoist в течение 10 секунд (общее время обработки одной линзы 20 секунд).
- Заполните контейнер для линз свежим многофункциональным раствором Опти-Фри PureMoist.
- Оставьте линзы в закрытом контейнере как минимум на 6 часов или на всю ночь. После пребывания в растворе в течение указанного времени линзы готовы к ношению.
- Если на контактных линзах остались какие-либо инородные частицы, промойте их многофункциональным раствором Опти-Фри PureMoist перед надеванием. Вы можете хранить линзы в закрытом контейнере, содержащем многофункциональный раствор Опти-Фри PureMoist, в течение 30 дней. По истечении указанного срока перед дальнейшим использованием линзы необходимо заново очистить и продезинфицировать свежим многофункциональным раствором Опти-Фри PureMoist.

Всегда выполняйте рекомендации своего офтальмолога. Не изменяйте раствор или процедуру ухода за линзами, не проконсультировавшись с врачом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist с контейнером для хранения контактных линз поставляется в картонной коробке с инструкцией по применению. На картонную коробку нанесен номер серии, дата производства и дата истечения срока годности. Раствор Опти-Фри PureMoist стерилизуется с использованием асептических технологий и доступен в стерильных пластиковых флаконах объемом от 60 до 470 мл. На флаконы нанесен номер серии, дата производства и дата истечения срока годности.

Контейнер для хранения контактных линз не является стерильным изделием. Контейнер для хранения контактных линз поставляется с каждым флаконом раствора Опти-Фри PureMoist.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Спецификация раствора Опти-Фри PureMoist

| | |
|----------------------|---|
| Цвет | Бесцветный |
| Механические частицы | Практически не содержит механических частиц |
| Стерильность | Стерильный |

ТРАНСПОРТИРОВКА

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями, действующими на каждом виде транспорта. Придерживайтесь национальных стандартов при транспортировке изделия.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ раствора Опти-Фри PureMoist:

| Объем | Срок годности |
|------------------------|---------------|
| 60 мл (флакон 60 мл) | 24 месяцев |
| 90 мл (флакон 120 мл) | 24 месяцев |
| 120 мл (флакон 120 мл) | 36 месяцев |
| 300 мл (флакон 360 мл) | 36 месяцев |
| 420 мл (флакон 470 мл) | 36 месяцев |

Условия хранения:

| | |
|-------------|-----------------|
| Температура | от 15°C до 30°C |
| Влажность | Не применимо |

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ контейнера для хранения контактных линз

Не применимо. Не является стерильным изделием.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist – стерильный раствор. Всегда используйте свежий многофункциональный раствор Опти-

Фри PureMoist. Никогда не используйте повторно раствор из контейнера для хранения контактных линз. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате неправильного использования медицинского изделия.

Не используйте медицинское изделие при любом повреждении упаковки. Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями. Все вопросы, связанные с функционированием изделия, могут быть адресованы Уполномоченному представителю производителя. Компания производитель гарантирует корректное функционирование изделия в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения. По вопросам качества изделия следует обращаться к Уполномоченному представителю производителя.

ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Не применимо.

ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Не применимо.

ДАННЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Придерживайтесь национальных стандартов при утилизации или переработке продукта или его компонентов.

Специальное требование для России: в условиях стационара, склада и т.п., при необходимости, медицинское изделие утилизируют и уничтожают в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами, регламентирующимися СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

производитель

Производитель:

«Алкон Лабораториз, Инк.», США,

Alcon Laboratories Inc.,

6201 South Freeway,

Fort Worth, TX, 76134-2099, USA.

Место производства:

США.

**Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации
ООО «Алкон Фармацевтика»**

Адрес ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:

125315, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.

Тел. +7 (495) 961-13-33.

торговая марка компании Novartis

© <Year> Novartis